

GEBRAUCHSANWEISUNG

ZeoBentMED VULKANMINERALIEN

KURZBESCHREIBUNG

Detox Pulver oder Detox Pulver ultrafein oder Detox Kapseln.
Natürliches Medizinprodukt zur Unterstützung der Bindung und Ausleitung von Schwermetallen aus dem Organismus.
100 % NATUR

ZUSAMMENSETZUNG

80 % Klinoptilolith-Zeolith + 20 % Montmorillonit-Bentonit oder 50 % Klinoptilolith-Zeolith ultrafein + 50 % Montmorillonit-Bentonit, 50 % Klinoptilolith-Zeolith ultrafein + 50 % Montmorillonit-Bentonit à 500 mg je Cellulose Kapsel.

ZWECKBESTIMMUNG

Dieses natürliche Medizinprodukt unterstützt die Bindung und Ausleitung von Schwermetallen (Pb, Hg, Cr, Cd, Al und Ni) aus dem Organismus von erwachsenen Personen. Es kann zusätzlich im Zusammenhang mit chronisch erhöhten Schwermetallwerten auftretende Symptome wie Müdigkeit und Kopfschmerzen vermindern.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Beenden Sie die Einnahme, wenn Sie unerwartete Nebenwirkungen bemerken und konsultieren Sie Ihren Arzt. Bei Auftreten von Verstopfung ist die Flüssigkeitszufuhr zu erhöhen, die Dosierung zu reduzieren und ggf. Ihr Arzt zu konsultieren. Die Anwendung bei Patienten mit vorliegender Obstipation, eingeschränkter Nierenfunktion, mit bestehender Krankheit, bei medikamentöser Therapie oder bei Chemo- oder Strahlentherapie, darf nur nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Stillende oder schwangere Frauen, Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren) müssen vor der Anwendung des Medizinprodukts ihren Arzt kontaktieren. Produkt nicht einatmen. Nicht zeitgleich mit alkoholischen, koffein- und säurehaltigen Getränken wie Grapefruit-, Orangen, Zitronen- und Ananassaft anwenden. Spülen Sie bei Augenkontakt die Augen ausreichend. Sorgen Sie während der Anwendung für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr in Form von Wasser oder anderen alkoholfreien Getränken. Nicht zur ununterbrochenen Daueranwendung bestimmt. Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken.

Nebenwirkungen: Insbesondere in der ersten Woche nach der Einnahme kann es zu Verstopfung (Obstipation) kommen. In sehr seltenen Fällen kann es zu Beginn der Einnahme zu Blähungen, Magenschmerzen, Übelkeit, Schwindelgefühl und Müdigkeit kommen.

Wechselwirkungen: Achten Sie bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten auf einen zeitlichen Abstand von 2 Stunden. Nehmen Sie Medikamente, falls von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, vor der Einnahme von Klinoptilolith-Zeolith ein.

ART UND DAUER DER ANWENDUNG ZEOLITH ULTRAFEIN + BENTONIT PULVER

Medizinprodukt zur oralen Anwendung: 2-3 Mal täglich ½ gestrichenen Teelöffel (= 1 g) in ein Glas Wasser (250 ml) einrühren und unmittelbar zu den Mahlzeiten trinken. Die Einnahmedauer beträgt maximal 12 Wochen. Bei wiederholter Einnahme ist eine Anwendungspause von mindestens einer Woche einzuhalten.

ART UND DAUER DER ANWENDUNG ZEOLITH + BENTONIT PULVER

Medizinprodukt zur oralen Anwendung: 2-3 Mal täglich 1 gestrichenen Teelöffel (= 2 g) in ein Glas Wasser (250 ml) einrühren und unmittelbar zu den Mahlzeiten trinken. Die Einnahmedauer beträgt maximal 12 Wochen. Bei wiederholter Einnahme ist eine Anwendungspause von mindestens einer Woche einzuhalten.

ART UND DAUER DER ANWENDUNG ZEOLITH + BENTONIT (KAPSELN)

Medizinprodukt zur oralen Anwendung: 2-3 Mal täglich 2 Kapseln mit einem Glas Wasser (250 ml) zu den Mahlzeiten einnehmen. Die Einnahmedauer beträgt maximal 12 Wochen. Bei wiederholter Einnahme ist eine Anwendungspause von mindestens einer Woche einzuhalten.

LAGERUNG UND VERWENDBARKEIT

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Dose nach Verwendung fest verschließen. Lagern Sie das Produkt trocken und bei Zimmertemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verwenden Sie das Produkt nicht nach überschreiten des Verfallsdatums. Verwendbar bis: siehe Ablaufdatum auf der Dose

ENTSORGUNG

Inhalt und Verpackung können mit dem Hausmüll entsorgt werden, Violettgläser im Grünglascontainer.

HINWEISE ZU VORKOMMISSEN

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, durch den Anwender zu melden.

MEDIZINPRODUKTHERSTELLER

Natur Vital Handels GmbH
Wirtschaftszeile Ost 10
A-4482 Ennsdorf



SYMBOLE UND IHRE BEDEUTUNG

Symbol	Bedeutung
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
	Medizinprodukt
	Verwendbar bis
	Artikelnummer
	Seriennummer
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
	Vor Nässe schützen!
	CE-Kennzeichnung
	UDI
	Medizinprodukte-Hersteller
	Vertriebspartner
	Produktionsdatum

Rev. 00, 06/2023

Zeolith-Bentonit-**Versand.de**

Ihr Onlineshop für Vulkanminerale www.zeolith-bentonit-versand.de